

第一醫事檢驗所

檢體採集作業標準操作手冊

FCL-SOP-MT002
(2026 第 6 版)

發行日期	版次	制/修訂者	審查者	核准者	制/修訂主旨
2026/06/01	2026(4)	林育青	鍾文婷	陳律吾	1. 修訂附件「檢驗項目一覽表」 2. 修改1.5~1.6服務時間
2026/08/01	2026(5)	林育青	鍾文婷	陳律吾	修訂附件「檢驗項目一覽表」
2026/09/01	2026(6)	林育青	鍾文婷	陳律吾	修訂附件「採檢容器一覽表」、 「檢驗項目一覽表」

年度審查欄			
審查年度	日期	審查人員	備註
2026	03.13	林育青	
2027			
2028			

 第一醫事檢驗所 First Clinical Laboratory	檢體採集作業標準操作手冊	文件編號	FCL-SOP-MT002
		發行日期	2026/09/01
		版 次	2026(6)
		頁次/總頁數	2 / 11

目 錄

1. 第一醫事檢驗所簡介	3
2. 檢驗申請單種類	3
3. 檢體採集原則說明	3
4. 檢驗項目加/補驗時效	9
5. 附件：	
5.1 採檢容器一覽表(FCL-QR-MT002-01)	
5.2 檢驗項目一覽表(FCL- QR-MT002-02)	
5.3 抱怨處理流程圖(FCL-QP07-R03)	

 第一醫事檢驗所 First Clinical Laboratory	檢體採集作業標準操作手冊	文件編號	FCL-SOP-MT002
		發行日期	2026/09/01
		版 次	2026(6)
		頁次/總頁數	3 / 11

1. 第一醫事檢驗所簡介

1.1 沿革：

第一醫事檢驗所成立於 2022 年，由一群台灣深耕醫療產業多年的醫院管理顧問、醫療設備租賃、醫藥品及衛耗材整合供應商和醫師們組成的專業團隊。希望透過所擁有的經驗豐富醫技和醫療管理團隊，協助提供基層醫療院所需要的臨床檢驗服務，讓社區民眾也能享受高品質且便捷的醫療照護。

1.2 服務項目：臨床生化檢驗、臨床血液檢驗、臨床血清檢驗、臨床鏡檢檢驗、臨床微生物及分子生物檢驗。

1.3 個人資訊與隱私保護政策：

1.3.1 本所全體應遵守「個人資料保護法」，確保機密資料受到保護，蒐集、處理個人資料，應取得當事人書面同意。

1.3.2 實驗室資訊系統，有文件化的程序，及權限防護，確保機密資料受到保護，確保病人資訊的機密性。

1.3.3 本所有配合主管機關行政檢查之義務。

1.4 本實驗室之諮詢與抱怨管道：

1.4.1 地址：新北市板橋區文化路一段 188 巷 51 號 3 樓。

1.4.2 電子信箱：Lab@firstcl.com.tw。

1.4.3 電話：(02) 2258-6008

1.4.4 傳真：(02) 2258-6002

1.4.5 本實驗室抱怨處理流程圖，詳見附件 5.3。

1.5 服務時間：週一到週五 9：00-17：30，國定例假日休息。

1.6 抽血服務時間：週一到週五 9：30-17：00 (12:00-13:00 中午休息)

2. 檢驗申請單種類

2.1 本實驗室制式之「第一醫事檢驗所檢驗申請單(QP17-R01)」、OPD 檢驗項目勾選單(QP17-R04)。

2.2 醫療機構自製之送檢單。

3. 檢體採集原則說明

3.1 血液樣本採集步驟：

3.1.1 採血前準備：

3.1.1.1 血液檢體採集應有之耗材包括消毒用酒精棉（片）、碘酒、長棉枝、止血帶、採血針、針頭、轉接套組、真空採血管、透氣膠帶與相關檢體標示貼紙等。

3.1.1.2 採檢時應穿著實驗衣、戴口罩、手套；長髮應束起，方可進行血液標本採集。

3.1.2 確認病患身份：

3.1.2.1 來賓提供證件核對身分時：抽血人員請來賓答覆姓名及出示具照片之正式

 第一醫事檢驗所 First Clinical Laboratory	檢體採集作業標準操作手冊	文件編號	FCL-SOP-MT002
		發行日期	2026/09/01
		版 次	2026(6)
		頁次/總頁數	4 / 11

證件以供核對，確認 2 種以上基本資料相符。

3.1.2.2 特殊來賓確認身分有以下方式：

- (1) 未能言語者應要求出示具照片之證件。
- (2) 虛弱之來賓則可由隨行親友代答及出示具照片之證件，但醫檢師應查辨性別、年歲、病患的意識狀態與抽血意願。
- (3) 兒童應有親人隨行及出示具照片之證件。
- (4) 外籍人士體檢以提供護照進行身份辨識。

3.1.2.3 詢問病患抽血條件或空腹狀態：

- (1) 檢驗項目有指定空腹項目時，須空腹至少 8 小時，方可進行採血。

3.1.2.4 檢體標示：檢體管標示來賓姓名。

3.1.3 選擇靜脈抽血部位：

3.1.3.1 優先選擇之血管順序：尺骨中靜脈（Median cubital vein），位於肘窩的表淺靜脈為最常被選的手臂靜脈穿刺部→貴要靜脈（Basilic vein），位於肘前臂，為肱靜脈分枝→頭靜脈（Cephalic vein），位於肘上臂，為腋靜脈分枝。

3.1.3.2 禁忌部位：

- (1) 乳房移植或手術同側手臂。
- (2) 水腫或血腫部位。
- (3) 輸血同側手臂。
- (4) 疤痕部位。
- (5) 動靜脈瘻管或任何導管同側手臂。
- (6) 點滴輸入同側手臂。

3.1.4 綁上止血帶：

3.1.4.1 綁上止血帶時間應小於 1 分鐘。

3.1.4.2 綁止血帶之強度以仍能伸入一隻手指頭之鬆緊為佳。

3.1.4.3 綁止血帶位置應在採血位置上方 7-10 公分左右。

3.1.4.4 消毒預備採血部位：以酒精棉（片）在抽血下針部位，由內而外之環狀擦拭，直徑約 5-7 公分（約 3 圈）進行消毒。

3.1.4.5 消毒過之位置應自然揮發乾燥（禁止用手搥乾，避免落菌污染），可避免仍有酒精狀態下入針而易造成溶血。

3.1.4.6 若再次以手觸摸採血位置，則務必再行環狀擦拭消毒採血位置。

3.1.4.7 採檢容器順序如下表：（資料來源：檢驗前作業指引 TSLM-PG-SP-04(1)）

採血順序	種類	頭蓋顏色	添加劑成分	混合次數
1.	血液培養	 使用蝴蝶針嗜氧瓶 先於厭氧瓶	N/A	3-4
2.	棄置採血管	 透明 Clear	Non additive	N/A
3.	血液凝固	 淺藍色 Light blue	Buffered 3.2% sodium citrate	3-4
	紅血球沉降速率	 黑色 Black	Buffered citrate	8-10
4.	生化血清	 紅色 Red	Silicone Coated	5-6
	血清/血庫	 黃色 Gold	Clot activator and gel	5-6
	微量元素	 深藍色紅標 Royal blue / Red label	Silicone Coated	5-6
5.	生化血漿&特殊	 綠色 Green	Heparin	8-10
		 淺綠色 Light green	Heparin and gel	8-10
6.	血液學及血庫	 紫色 Lavender	K ₂ EDTA	8-10
	微量元素	 深藍色紫標 Royal blue / Lavender label	K ₂ EDTA	8-10
	分生(血漿)	 白色 White	K ₂ EDTA and gel	8-10
7.	血糖	 灰色 Gray	NaF / K Oxalate NaF / Na EDTA	8-10
8.	親緣鑑定	 淡黃色 Yellow	Acid Citrate Dextrose	8-10

3.1.5 選取合適大小的針頭進行採血：

3.1.5.1 使用真空採血管組採血步驟如下：

- (1) 取連續採血雙頭針，建議使用 21-22 號針頭。拔去白色封套，將橡皮端（內有針）部分旋入持針器（Holder）中固定（若使用安全針具時則先轉回收針鞘），再除去針頭封套。
- (2) 待酒精乾後，以拉緊皮膚方式固定，以下針角度 15-30 度角進行靜脈穿刺。下針時，針的鋒面朝上，入針應在 1/3 至 1/2 針長左右，穿刺後固定好位置，以便推入真空採血管。
- (3) 將真空採血管推入持針器，針頭之橡皮端穿破橡皮塞，血液便流入真空採血管。當真空採血管的真空消失，血流便停止。此時輕輕用拇指壓抵持針器的凸緣將管子橡皮塞脫離針頭，再將採血管從持針器中移出。若要連續採血多管，則依真空採血試管優先順序重複此步驟。
- (4) 血液採集後輕輕將含抗凝劑之試管以 180 度上下翻轉數次，使管內添加劑與血液混和均勻。但不可過度搖動，造成溶血現象。

 第一醫事檢驗所 First Clinical Laboratory	檢體採集作業標準操作手冊	文件編號	FCL-SOP-MT002
		發行日期	2026/09/01
		版 次	2026(6)
		頁次/總頁數	6 / 11

3.1.5.2 使用傳統空針採血步驟如下：

- (1) 傳統空針能取得之血液量受限於針筒大小，此部分或可用為病患血管較細者之採血服務，實務經驗上確實較容易採到血液。
- (2) 選擇適當血管，除去針頭塑膠部分，以下針角度 15 度角在預備採血部位進行靜脈穿刺。
- (3) 採手拉針筒方式取得血液，以傳統空針採完血後，需將血液轉注於真空管內，建議更換為 19-21 號針頭為之；分注時不可以推壓針筒，以避免溶血。
- (4) 真空採血管橡皮蓋不建議打開，以避免血液檢體暴露於空氣中，有一定的生物危險性（Biohazard）。

3.1.6 請病患緊壓傷口 5 分鐘，告知為協助傷口止血，不可搓揉且不宜彎曲手臂。

3.1.7 抽血流程注意事項：

3.1.7.1 避免溶血的方法：

- (1) 務必酒精消毒處風乾後，再行採血。
- (2) 避免使用太細之針頭。
- (3) 避開血腫的地方進行採血。
- (4) 使用傳統式空針抽血時，避免抽拉針筒太過急遽或反覆抽送造成溶血。
- (5) 使用傳統式空針抽血分注入真空管時，避免推針筒加壓行為，而造成溶血。
- (6) 搖晃含抗凝劑之採血管時，應避免動作過劇而造成溶血。

3.1.7.2 避免組織液滲入採血容器，影響數值，其建議如下：

- (1) 綁止血帶不超過一分鐘。
- (2) 病患拳頭不必重複張握加壓。
- (3) 病患血管狀況不佳時，可建議病患進行烘手或熱敷，讓靜脈血管適度充血。

3.1.8 病患採血後造成的不適症狀與處理方法：

3.1.8.1 血腫、皮下出血：

- (1) 發生原因：為未充份壓迫止血、靜脈壁損傷引起皮下出血，或是穿刺部位加以揉搓所導致。
- (2) 症狀：感覺疼痛並伴隨皮下血腫。
- (3) 處理原則：安撫病患並給予正確的衛教，若會疼痛應於 24 小時內冰敷止痛，24 小時後改熱敷，慢慢散去血塊；並告知病患淤血會自行吸收及復原。

3.1.8.2 末梢神經受損：

- (1) 發生原因：多為針扎的太深或入針角度不正確，傷及神經或引起神經障礙。

 第一醫事檢驗所 First Clinical Laboratory	檢體採集作業標準操作手冊	文件編號	FCL-SOP-MT002
		發行日期	2026/09/01
		版 次	2026(6)
		頁次/總頁數	7 / 11

(2) 症狀：患者在針扎時會感覺被電到，採血後手指或手臂有麻痺或持續抽痛的症狀。

(3) 處理原則：說明傷勢約一個月內會慢慢自行復原。

3.1.8.3 靜脈炎：

(1) 發生原因：採血部位細菌感染。

(2) 症狀：在抽血後血管有紅腫現象並引起發炎、疼痛或發熱現象。

(3) 處理原則：建議請專科醫師診治。

3.2 生化血清：

3.2.1 受檢者準備：

(1) 空腹要求：Glucose 應禁食 8-12 小時。若測脂肪類：如 Cholesterol、TG、Lipoprotein 之相關檢驗應禁食 10-14 小時。

(2) 用藥要求：血清免疫項目可能受到治療劑量的生物素(Biotin>5 mg/天)干擾，建議採檢時間距離最後一次服藥至少 8 小時。

3.2.2 採血針頭要求：儘量以 21 或 22 號的針頭採血，避免溶血，嚴重溶血會影響 K、Mg、GOT、GPT、Bilirubin、CPK、CPK-isoenzyme、LDH、LDH-isoenzyme、Alk-Ptase、Acid-Ptase、Protein-EP、A/G、 γ -GT 等檢驗項目結果。

3.2.3 運送和暫存檢體原則：

3.2.3.1 因故不能立即送檢之檢體，建議應於兩小時內分離血清或血漿，以免因放置過久而引起檢體成份變化。

3.2.3.2 若無法即時離心，未離心之凝固檢體冷藏可抑制細胞代謝，維持檢體穩定性，但部分項目數據仍會受到影響。

3.2.3.3 在未離心並冷藏(2-8°C)的條件下 Glucose、Potassium、LDH 兩小時穩定，Serum Iron 8 小時穩定。其他一般生化項目冷藏可與血球接觸穩定 48 小時，而離心後隔離膠分隔血清、血球可穩定 2-5 天，減低暫存過程對檢驗結果造成的影響。

3.2.3.4 CO₂、Lactate 等項目不宜置於室溫太久（20 分鐘以內），並應冰浴進行暫存及運送。

3.2.3.5 灰頭 NaF 管 15-25°C 可穩定血糖 3 天。

3.3 血液：

3.3.1 血液計數檢查之檢體(紫頭)，採檢後應於室溫 2 小時內送達實驗室，若採集後無法立即運送，可將檢體暫存於室溫或冷藏，但放置過久將影響細胞型態。

3.3.2 血液凝固檢查之檢體(藍頭)，須注意血量和抗凝劑是否合乎比例（達到試管指定刻度誤差 10%以內），採檢後應於冷藏 2 小時內送達實驗室。若採集後無法立即運送，可將檢體離心後取上清液(血漿)冷凍，送檢過程應保持凍結。

3.3.3 上述兩項皆須注意檢體是否與抗凝劑充分混合及採血過程過程是否過久，以避免凝固。

 第一醫事檢驗所 First Clinical Laboratory	檢體採集作業標準操作手冊	文件編號	FCL-SOP-MT002
		發行日期	2026/09/01
		版 次	2026(6)
		頁次/總頁數	8 / 11

3.4 尿液：

3.4.1 尿液常規檢查（Urine routine）或懷孕試驗：

- 3.4.1.1 最好的檢體.為早晨初次尿液。
- 3.4.1.2 病患將前段約 1/3 尿液排掉。
- 3.4.1.3 取中段尿液收集於乾淨的塑膠尿杯中。
- 3.4.1.4 將塑膠杯的尿液倒入尿液尖底管中，蓋好瓶蓋，新鮮送檢，若無法於 2 小時內送檢，請保存於 2-8°C 冰箱內，儘快送檢。

3.4.2 24 小時尿液：

- 3.4.2.1 收集 24 小時尿液混合後取 7-10 mL 放入尿液尖底管內，即可送檢。

3.4.3 尿液培養：

- 3.4.3.1 請直接取中段尿液於無菌收集盒。
- 3.4.3.2 蓋好瓶蓋，新鮮送檢，若無法於 2 小時內送檢，請保存於 2-8°C 冰箱內，儘快送檢。

3.5 糞便：

3.5.1 糞便常規檢查：

- 3.5.1.1 將糞便排放於乾淨的便盆或玻璃缸或塑膠袋上（勿使用衛生紙、報紙等包裹，因紙纖維會導致潛血試驗（occult blood）呈陽性反應；不可將尿液排於糞便上，因尿液對原蟲（protozoa）有害）。
- 3.5.1.2 將糞便瓶蓋打開，使用採檢棒挖取糞便，大約挖取一粒花生米大小（可採取有黏液、血樣等可疑部位）。
- 3.5.1.3 栓緊瓶蓋後，室溫保存當日送檢。

3.5.2 潛血：

3.5.2.1 化學法（定性）：

- (1) 使用糞便收集盒收集檢體（藍頭寬口瓶）。
- (2) 糞便收集前三天請禁食肉類食物、維他命 C、鐵劑等。
- (3) 女性月經期間建議暫停此項檢查。

3.5.2.2 免疫法（定量）：

- (1) 使用專用採檢容器收集檢體（專用綠頭採便管）。
- (2) 將綠色的蓋子旋開，取出採便棒。
- (3) 往糞便不同的部位刺 6 次，少量的大便覆蓋螺旋狀溝槽即可。
- (4) 再將採便棒放回採便管中。
- (5) 蓋緊蓋子，激烈搖晃混合後送檢。
- (6) 檢體採集後，室溫保存當日送檢；無法立即送檢時，存放於 2-8°C 冰箱，隔日送檢。
- (7) 女性月經期間建議暫停此項檢查。

3.5.3 糞便寄生蟲檢查：

 第一醫事檢驗所 First Clinical Laboratory	檢體採集作業標準操作手冊	文件編號	FCL-SOP-MT002
		發行日期	2026/09/01
		版 次	2026(6)
		頁次/總頁數	9 / 11

3.5.3.1 將糞便排放於乾淨的便盆或玻璃缸或塑膠袋上（勿使用衛生紙、報紙等包裹，因紙纖維會導致潛血試驗（occult blood）呈陽性反應；不可將尿液排於糞便上，因尿液對原蟲（protozoa）有害）。

3.5.3.2 將糞便瓶蓋打開，以內附攪拌棒挖取糞便，大約挖取拇指頭大小的糞便，如水便或稀便以塑膠吸管吸取 1-2 mL，放入 S-Y 糞便濃縮集卵瓶。

3.5.4 幽門螺旋桿菌檢查：

3.5.4.1 糞便抗原檢測(定性)：

- (1) 使用專用採檢容器收集檢體（專用紫頭採便管）。
- (2) 將紫色的蓋子旋開，取出採便棒。(勿旋開白色上蓋)
- (3) 往糞便不同的部位刺 3 次，少量的大便覆蓋螺旋狀溝槽即可。
- (4) 再將採便棒放回採便管中。
- (5) 蓋緊蓋子，搖晃混合後送檢。
- (6) 檢體採集後，室溫保存當日送檢；無法立即送檢時，存放於 2-8℃ 冰箱，隔日送檢。
- (7) 女性月經期間、腹瀉、痔瘡出血建議暫緩此項檢查。

3.6 精液：

3.6.1 收集精液前連續禁慾 2-3 天，但不可超過五天。

3.6.2 受檢人應在舒適、隱密的環境下，以手淫的方式將精液排到乾淨無菌的透明盒。

3.6.3 若受檢人無法以手淫方式取得精液，可使用不含殺精劑的保險套，以性交方式取得精液，再倒入容器內。

3.6.4 收集後應在 30-60 分鐘內送檢。

3.7 痰液：

3.7.1 早晨第一口痰是最好的檢體，可代表肺部整晚所分泌的痰液。

3.7.2 病患先以開水漱口，除去大多數的污染物質。

3.7.3 病患自行咳出痰液，或使用誘導方式取得，若仍無法取得檢體，就得由有經驗的醫師使用氣管抽取術抽取痰液。

3.8 檢體採檢容器及其採檢量請參閱「採檢容器一覽表」(FCL-QR-MT002-01)。

3.9 各項檢驗項目之注意事項請參閱「檢驗項目一覽表」(FCL-QR-MT002-02)。

3.10 不良狀況：遇下述情事將與客戶聯繫。

3.10.1 有單據無檢體或有檢體無單據。

3.10.2 檢體標示與單據不符。

3.10.3 檢體標示或單據無法辨識。

3.10.4 或檢體與檢驗項目不符。

3.10.5 檢體不足或採檢容器破損。

3.10.6 嚴重溶血達原廠宣告之干擾水準。

 第一醫事檢驗所 First Clinical Laboratory	檢體採集作業標準操作手冊	文件編號	FCL-SOP-MT002
		發行日期	2026/09/01
		版 次	2026(6)
		頁次/總頁數	10 / 11

3.10.7 檢體凝固(clot、clump)。

3.10.8 有以上情況者即退件。

4. 檢驗項目加/補驗時效

4.1 因檢體的保存時間、暫存條件與檢驗項目特性，而有不同的穩定狀況。以下列舉最常進行加補驗的項目以供參考。其餘項目請參閱「檢驗項目一覽表」(FCL-QR-MT002-02)。

4.1.1 不接受加驗：尿液常規、糞便相關檢驗。

4.1.2 僅接受當天加驗：血液常規(CBC)。

4.1.3 接受三天內加驗：HbA1C、一般生化（註：檢體溶血不接受加驗）。

5. 附件：

5.1 採檢容器一覽表(FCL-QR-MT002-01)。

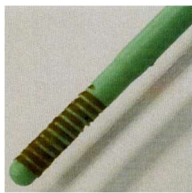
5.2 檢驗項目一覽表(FCL-QR-MT002-02)。

5.3 抱怨處理流程圖(FCL-QP07-R03)

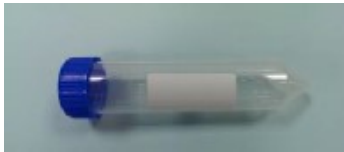
 第一醫事檢驗所 First Clinical Laboratory	檢體採集作業標準操作手冊	文件編號	FCL-SOP-MT002
		發行日期	2026/09/01
		版 次	2026(6)
		頁次/總頁數	11 / 11

附 件

採檢容器一覽表

採檢容器名稱及圖示		使用說明	
1：黃頭生化管	內容物	採檢管容量	容許採檢量
	含分離膠，離心後可將血清與血球分離	5 mL	2~5 mL
2：灰頭採血管	內容物	採檢管容量	容許採檢量
	含 NAF 可抑制酵素活性，避免血糖下降	2 mL	1~2 mL
3：紫頭採血管	內容物	採檢管容量	容許採檢量
	含 EDTA，可抑制凝血	3 mL	2~3 mL
4：藍頭採血管	內容物	採檢管容量	容許採檢量
	含 3.2% sodium citrate 抗凝劑，凝血測試專用	採血量請務必達到採血管標籤標示▼或■位置	
5：尿管	內容物	採檢管容量	容許採檢量
	無	12 mL	7~10 mL
6：糞便濃縮集卵瓶	內容物	容許採檢量	
	無	一粒拇指頭大小即可	
7：糞便收集盒	內容物	容許採檢量	
	無	一粒拇指頭大小即可	
8：FOBT 採檢專用管	內容物	容許採檢量	
	檢體採集器內有 buffer，可保存檢體中的 Hemoglobin 的活性	 糞便剛好填滿凹槽，勿過多。	

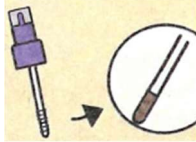
採檢容器一覽表

採檢容器名稱及圖示	使用說明		
9：寬口無菌杯	內容物	採檢管容量	容許採檢量
	無	20mL	NA (用於細菌培養之檢體，如尿液、體液、糞便、水質、精液等。)
10: 50mL 尖底離心管	內容物	採檢管容量	容許採檢量
	無	50 mL	NA (用於痰液、TB、體液等培養)
11: 藍頭 Transtube(嗜氧)	內容物	採檢管容量	容許採檢量
	Amies Agar Gel (NO Charcoal)	NA	NA (可用於 Stool、GBS、Pus /Wound 培養)
12: 黑頭 Transtube(厭氧)	內容物	採檢管容量	容許採檢量
	Amies Agar Gel (With Charcoal)	NA	NA (可用於 Stool、GBS、Pus /Wound 培養)
13: 無菌痰盒	內容物	採檢管容量	容許採檢量
	無	25mL	NA (可用於痰液培養)

採檢容器一覽表

14:血瓶					
條碼標籤 簡稱	一般血瓶		去抗生素血瓶		小兒血瓶
適用範圍	一般血液培養		使用 抗生素 病患血液培養專用		小兒專用 血液培養
採血量	5-10ml	5-10ml	5-10ml	5-10ml	1-3ml
血瓶					
	需氧瓶	厭氧瓶	需氧瓶	厭氧瓶	小兒血瓶

採檢容器一覽表

採檢容器名稱及圖示	使用說明		
15: 綠頭採血管	內容物	採檢管容量	容許採檢量
	含 Lithium Heparin，可抑制凝血	4mL	2-4mL
16: 深藍頭採血管	內容物	採檢管容量	容許採檢量
	含 K2EDTA 抗凝劑	6mL	3-6mL
17: HpAg 專用糞便收集管	內容物	容許採檢量	
	緩衝液		1-2g 米粒大小 (糞便剛好填滿凹槽，勿過多)
18: Swab 專用管	內容物	容許採檢量	
	緩衝液	NA (可用於子宮頸、陰道、肛門直腸、尿道口、口咽等採檢)	

檢驗項目一覽表

臨床生化檢驗

適應症：肝功能檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
AST(GOT)	09025C	1:黃頭管/血清	13 - 39	U/L	1日	接受三天內加驗;避免溶血
ALT(GPT)	09026C	1:黃頭管/血清	6 - 44	U/L	1日	接受三天內加驗;避免溶血
Alkaline- Phosphatase	09027C	1:黃頭管/血清	34 - 104	U/L	1日	接受三天內加驗;避免溶血
GGT	09031C	1:黃頭管/血清	9 - 64	U/L	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Total Protein	09040C	1:黃頭管/血清	6.4 - 8.9	g/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Albumin	09038C	1:黃頭管/血清	3.5 - 5.7	g/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Globulin	09039C	1:黃頭管/血清	2.0 - 3.5	g/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
A/G ratio		1:黃頭管/血清	1.2 - 2.2		1日	接受三天內未溶血檢體加驗
T-Bilirubin	09029C	1:黃頭管/血清	0.26 - 1.22	mg/dL	1日	不接受加驗;避免溶血
D-Bilirubin	09030C	1:黃頭管/血清	0.05 - 0.24	mg/dL	1日	不接受加驗;避免溶血
適應症：腎功能檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
BUN	09002C	1:黃頭管/血清	7 - 25	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Creatinine	09015C	1:黃頭管/血清	男性：0.7 - 1.3 女性：0.6 - 1.2	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Uric acid	09013C	1:黃頭管/血清	男性：4.4 - 7.6 女性：2.3 - 6.6	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Microalbumin	12111C	6:尿管/尿液	<2	mg/dL	1日	接受當日檢體加驗
Urine-Creatinine	09016C	6:尿管/尿液	原廠未提供	mg/dL	1日	接受當日檢體加驗
Urine-Protein	09040C	6:尿管/尿液	<10.0	mg/dL	1日	接受當日檢體加驗
Urine-Protein(24hrs)	09040C	6:尿管/尿液	50 - 80	mg/day	1日	接受當日檢體加驗
UACR		6:尿管/尿液	<30	mg/g	1日	接受當日檢體加驗
UPCR		6:尿管/尿液	<150	mg/g	1日	接受當日檢體加驗
CCR		6:尿管/尿液	男性：85 - 125 女性：70 - 110	mL/min	1日	接受當日檢體加驗
Cystatin C	08113B	1:黃頭管/血清	0.56-1.02	mg/L	6日	外送立人醫事檢驗所(週三、六操作)

檢驗項目一覽表

臨床生化檢驗

適應症：血脂與脂蛋白檢查（禁食10-14小時）						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Triglyceride	09004C	1:黃頭管/血清	< 150	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Total Cholesterol	09001C	1:黃頭管/血清	< 200	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
HDL-C	09043C	1:黃頭管/血清	男性：> 40；女性：> 50	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
LDL-C	09044C	1:黃頭管/血清	< 130	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Total C/HDL-C		1:黃頭管/血清	< 5.0		1日	接受三天內未溶血檢體加驗
LDL-C/HDL-C		1:黃頭管/血清	< 3.5		1日	接受三天內未溶血檢體加驗
sd-LDL		1:黃頭管/血清	<35	mg/dL	9日	外送立人醫事檢驗所(週三操作)
Lipoprotein-EP	09066B	1:黃頭管/血清	Alpha：22.3-53.3 Pre-beta：4.4-23.1 Beta：38.6-69.4	%	9日	外送立人醫事檢驗所(週一早上操作)
Apo A1	12114B	1:黃頭管/血清	100-200	mg/dL	3日	外送立人醫事檢驗所
Apo B	12113B	1:黃頭管/血清	50-155	mg/dL	3日	外送立人醫事檢驗所
Lipoprotein a；Lp(a)	12164B	1:黃頭管/血清	≤30	mg/dL	5日	外送立人醫事檢驗所(週三、六操作)
適應症：血糖檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Glucose(AC)飯前血糖	09005C	2:灰頭管/血漿	70 - 99	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗 ；禁食8-12小時
Glucose(PC)飯後血糖	09005C	2:灰頭管/血漿	70-139	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗 ；飯後2小時
HbA1c	09006C	3:紫頭管/全血	4.0 - 6.0	%	1日	接受三天內加驗
Glycated Albumin	09139C	1:黃頭管/血清	11 - 16	%	5日	外送立人醫事檢驗所(週三、六操作)
適應症：電解質檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Mg (Magnesium)	09046B	1:黃頭管/血清	1.9-2.7	mg/dL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Ca	09011C	1:黃頭管/血清	8.6 - 10.3	mg/dL	1日	接受三天內加驗；避免溶血
Phosphorus	09012C	1:黃頭管/血清	2.5 - 5.0	mg/dL	1日	接受三天內加驗；避免溶血
Na	09021C	1:黃頭管/血清	136 - 146	mmol/L	1日	接受三天內加驗；避免溶血
K	09022C	1:黃頭管/血清	3.5 - 5.1	mmol/L	1日	接受三天內加驗；避免溶血
CL	09023C	1:黃頭管/血清	101 - 109	mmol/L	1日	接受三天內加驗；避免溶血

檢驗項目一覽表

臨床生化檢驗

適應症：心肌酵素檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
CK	09032C	1:黃頭管/血清	30 - 223	U/L	1日	接受三天內加驗;避免溶血
CKMB	09071C	1:黃頭管/血清	男性：≤5.2 女性：≤3.1	ng/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Troponin-I	09099C	1:黃頭管/血清	男性：0-0.0342 女性：0-0.0156	ng/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
LDH	09033C	1:黃頭管/血清	101-191	U/L	1日	接受三天內加驗;避免溶血
Homocysteine	12151C	1:黃頭管/血清	5-15；>60歲：5-20	μ mol/L	3日	外送杏聯醫事檢驗所
NT-proBNP	12193C	1:黃頭管/血清	<125	pg/mL	3日	外送中英醫院
適應症：胰臟酵素檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Amylase	09017C	1:黃頭管/血清	29-103	U/L	1日	接受三天內加驗;避免溶血
Lipase	09064C	1:黃頭管/血清	11-82	U/L	3日	外送杏聯醫事檢驗所
適應症：發炎指數檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
CRP	12015C	1:黃頭管/血清	<1.0	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
hs-CRP	12015C	1:黃頭管/血清	< 0.1	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
適應症：類風濕因子檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Rheumatoid Factor	12011C	1:黃頭管/血清	≤14	IU/mL	1日	接受三天內加驗;避免溶血
適應症：營養評估						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
TIBC	09035C	1:黃頭管/血清	240 - 450	ug/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Fe	09035C	1:黃頭管/血清	50 - 212	ug/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
UIBC	27047B	1:黃頭管/血清	155-355	ug/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Ferritin	12116C	1:黃頭管/血清	男性：23.9-336.2 女性：11.0-306.8	ng/ml	1日	接受兩天內未溶血檢體加驗
Folic Acid	09130B	1:黃頭管/血清	>4.0	ng/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Vit B12	09129B	1:黃頭管/血清	180-914	pg/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Vit.D3		1:黃頭管/血清	充足：30.0-100.0 不足：20.0-<30.0 缺乏：<20.0	ng/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所

檢驗項目一覽表

臨床生化檢驗

ISO 15189 醫學實驗室認證法 分析儀器 Roche c311(僅限客戶要求者)

檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
ALT(GPT)(Roche)	09026C	1:黃頭管/血清	男性：≤41 女性：≤33	U/L	1日	接受三天內加驗;避免溶血
AST(GOT)(Roche)	09025C	1:黃頭管/血清	男性：≤40 女性：≤32	U/L	1日	接受三天內加驗;避免溶血
BUN(Roche)	09002C	1:黃頭管/血清	6-20	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Uric acid(Roche)	09013C	1:黃頭管/血清	男性：3.4-7.0 女性：2.4-5.7	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Creatinine(Roche)	09015C	1:黃頭管/血清	男性：0.7-1.2 女性：0.5-0.9	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Triglyceride(Roche)	09004C	1:黃頭管/血清	< 150	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Total Cholesterol(Roche)	09001C	1:黃頭管/血清	< 200	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
HDL-Cholesterol(Roche)	09043C	1:黃頭管/血清	男性：> 40 ; 女性：> 50	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
LDL-Cholesterol(Roche)	09044C	1:黃頭管/血清	< 130	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗
Glucose(AC)(Roche)	09005C	2:灰頭管/血漿	70 - 99	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗 ; 禁食8-12小時
Glucose(PC)(Roche)	09005C	2:灰頭管/血漿	70-139	mg/dL	1日	接受三天內未溶血檢體加驗 ; 飯後2小時

檢驗項目一覽表

血清免疫檢驗

適應症：過敏源						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Total IgE	12031C	1:黃頭管/血清	≤100	IU/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
MAST 40項	30022C	1:黃頭管/血清	6(極高):>32 5(較高):16-32 4(高):8-16 3(中等):4-8 2(較低):2-4 1(低):1-2 0(無或微量):<1	AU	4日	外送杏聯醫事檢驗所
適應症：自體免疫相關						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
ANA	12053C	1:黃頭管/血清	1:80X(-)；>160X(+)		6日	外送杏聯醫事檢驗所
適應症：TDM(臨床藥物治療監測)						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Digoxin	10511C	1:黃頭管/血清	Adult：1.0-2.0 children：1.1-1.7	ng/mL	5日	外送杏聯醫事檢驗所
Phenytoin；Dilantin	10502B	1:黃頭管/血清	10-20；Toxic：>20	ug/mL	5日	外送杏聯醫事檢驗所
Theophylline	10509B	1:黃頭管/血清	10-20；Toxic：>20	ug/mL	5日	外送杏聯醫事檢驗所
Valproic Acid；Depakine	10510C	1:黃頭管/血清	50-100；Toxic：>100	ug/mL	5日	外送杏聯醫事檢驗所
Vancomycin	10531B	1:黃頭管/血清	Trough：5-10；Toxic：>10 Peak：20-40；Toxic：>40	ug/mL	5日	外送杏聯醫事檢驗所

檢驗項目一覽表

血清免疫檢驗

適應症：甲狀腺檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Anti-Thyroglobulin Antibodies	12068B	1:黃頭管/血清	<115	IU/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Anti-Thyroid Peroxidase Ab (Anti-TPO Ab)	12134C	1:黃頭管/血清	<34	IU/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Anti-TSHR	12121B	1:黃頭管/血清	≤ 1.75	IU/L	3日	外送杏聯醫事檢驗所
FT3	09107C	1:黃頭管/血清	2.50 - 3.77	pg/dL	1日	接受二天內未溶血檢體加驗
FT4	09106C	1:黃頭管/血清	0.63 - 1.18	ng/dL	1日	接受二天內未溶血檢體加驗
Intact-PTH	09122C	1:黃頭管/血清	12-88	pg/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
T3	09117C	1:黃頭管/血清	74 - 146	ng/dL	1日	接受二天內未溶血檢體加驗
T4	09010C	1:黃頭管/血清	5.7 -10.91	ug/dL	1日	接受當日檢體加驗
Thyroglobulin	09111C	1:黃頭管/血清	3.5-77	ng/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
TSH	27004C	1:黃頭管/血清	0.38-5.33	μIU/mL	1日	接受七天內未溶血檢體加驗
適應症：腫瘤篩檢						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
AFP	12007C	1:黃頭管/血清	≤ 9.0	ng/mL	1日	接受兩天內未溶血檢體加驗
CEA	12021B	1:黃頭管/血清	< 5.0 , Smokers:<10.0	ng/mL	1日	接受兩天內未溶血檢體加驗
CA125	12077C	1:黃頭管/血清	≤ 35	U/mL	1日	接受兩天內未溶血檢體加驗
CA153	12078C	1:黃頭管/血清	≤ 23.5	U/mL	1日	接受兩天內未溶血檢體加驗
CA199	12079B	1:黃頭管/血清	≤ 35	U/mL	1日	接受兩天內未溶血檢體加驗
PSA	12081C	1:黃頭管/血清	≤ 4.0	ng/mL	1日	接受當日檢體加驗
Free PSA	12198C	1:黃頭管/血清			1日	接受當日檢體加驗
Free PSA/PSA ratio		1:黃頭管/血清	≥ 25	%	1日	接受當日檢體加驗
NSE		1:黃頭管/血清	<16.3	ng/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
SCC	12080B	1:黃頭管/血清	≤ 1.5	ng/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
EB VCA-IgA	14046B	1:黃頭管/血清	<9 (-) ; 9-<11 (+/-) ; ≥ 11 (+)	NTU	5日	外送杏聯醫事檢驗所
Chromogranin A ; CgA		1:黃頭管/血清	< 101.9	ng/mL	4日	外送立人醫事檢驗所

檢驗項目一覽表

血清免疫檢驗

適應症：內分泌/荷爾蒙檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Cortisol	09113C	1:黃頭管/血清	8AM: 6.7~22.6 4PM: <10	µg/dl	1日	接受二天內未溶血檢體加驗
ACTH	09119B	3:紫頭管/血漿	7.2-63.3 (早上7-10點)	pg/ml	3日	外送立人醫事檢驗所
Renin Activity, PRA	09124B	3:紫頭管/血漿	清晨，仰臥：0.32-1.84 直立，兩小時：0.60-4.18	ng/mL/hr	6日	外送立人醫事檢驗所(週二、五早做)
Growth Hormone(EIA)	09108C	1:黃頭管/血清	成人：<6.60 兒童：在刺激試驗中,表明GH 缺乏的最低閾值為<6.60	ng/mL	7日	外送杏聯醫事檢驗所
DHEA-S	27080B	1:黃頭管/血清	男性DHEA-S 10-14歲：24.4-247 15-19歲：70.2-492 20-24歲：211-492 25-34歲：160-449 35-44歲：88.9-427 45-54歲：44.3-331 55-64歲：51.7-295 65-74歲：33.6-249 ≥75歲：16.2-123 女性DHEA-S 10-14歲：33.9-280 15-19歲：65.1-368 20-24歲：148-407 25-34歲：98.8-340 35-44歲：60.9-337 45-54歲：35.4-256 55-64歲：18.9-205 65-74歲：9.4-246 ≥75歲：12.0-154	µg/dl	3日	外送杏聯醫事檢驗所
SHBG		1:黃頭管/血清	男性：13.30-89.50 女性：18.20-135.50	nmol/L	3日	外送立人醫事檢驗所

檢驗項目一覽表

血清免疫檢驗

適應症：荷爾蒙檢查

檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
E2	09127C	1:黃頭管/血清	男性E2：ND-56 女性E2： 濾泡期：ND-160 排卵期：34-400 黃體期：27-246 更年期婦女：ND-30 口服避孕藥：ND-102	pg/ml	3日	外送杏聯醫事檢驗所
LH	09126C	1:黃頭管/血清	男性LH：1.24-8.62 女性LH 濾泡期：2.12-10.89 排卵期：19.18-103.03 黃體期：1.20-12.86 停經婦女：10.87-58.64	mIU/ml	3日	外送杏聯醫事檢驗所
FSH	09125C	1:黃頭管/血清	男性FSH：1.27-19.26 女性FSH 濾泡期：3.85-8.78 週期高峰：4.54-22.51 黃體期：1.79-5.12 停經婦女：16.74-113.59	mIU/ml	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Prolactin	09120C	1:黃頭管/血清	男性PRL：2.64-13.13 女性PRL： 停經前：3.34-26.72 停經後：2.74-19.64	ng/ml	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Beta-HCG	12022C	1:黃頭管/血清	男性β-HCG：<5 女性β-HCG： 未懷孕：<5 懷孕早期：5-25 停經期：<0.6-11.6	mIU/ml	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Testosterone	09121C	1:黃頭管/血清	男性：1.75-7.81 女性：<0.1-0.75	ng/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Free Testosterone		1:黃頭管/血清	男性：49.000-190.000 女性：1.730-15.900	pg/mL	3日	外送立人醫事檢驗所

檢驗項目一覽表

血清免疫檢驗

適應症：傳染病檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
HIV Ag/Ab Duo	14082C	1:黃頭管/血清	<1.0(-) ; ≥1.0(+)	COI	1日	接受七天內未溶血檢體加驗
HIV 1/2 Immunochromatographic Test (ICT)	14083C	1:黃頭管/血清	Negative		3日	外送立人醫事檢驗所
STS/RPR	12001C	1:黃頭管/血清	≤1:1(-)		1日	接受七天內未溶血檢體加驗
TPLA	12018C	1:黃頭管/血清	<10(-) ; ≥10(+)	T.U.	3日	外送立人醫事檢驗所
TPPA Test	12018C	1:黃頭管/血清	1:80(-)		5日	外送杏聯醫事檢驗所
Widal & Weil-Felix	12002B	1:黃頭管/血清	≤1 : 160X(-)		1日	接受七天內未溶血檢體加驗
Measles-IgG	14070B	1:黃頭管/血清	<13.5(-) ; 13.5-<16.5(+/-) ; ≥16.5(+)	AU/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Measles-IgM	14007B	1:黃頭管/血清	<0.8(-) ; 0.8-<1.1(+/-) ; ≥ 1.1(+)		5日	外送杏聯醫事檢驗所
Varicella-Zoster Virus IgG	14068B	1:黃頭管/血清	<150(-) ; ≥150(+)	mIU/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Rubella IgG	14044B	1:黃頭管/血清	<10(-) ; 10-<15(+/-) ; ≥15(+)	IU/ml	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Mumps Virus IgG	14009C	1:黃頭管/血清	<9(-) ; 9-<11(+/-) ; ≥11(+)	AU/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
HSV I IgG	14069B	1:黃頭管/血清	<0.9(-) ; 0.9-<1.1(+/-) ; ≥1.1(+)	index	3日	外送杏聯醫事檢驗所
HSV II IgG	14069B	1:黃頭管/血清	<0.9(-) ; 0.9-<1.1 (+/-) ; ≥1.1(+)	index	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Chlamydia IgA	12107C	1:黃頭管/血清	<5 (-) ; 5-<6 (+/-) ; ≥6 (+)	index	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Chlamydia IgG	12107C	1:黃頭管/血清	<9 (-) ; 9-<11 (+/-) ; ≥11 (+)	AU/mL	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Mycoplasma pneumoniae IgG	12020C	1:黃頭管/血清	1:40X(-)	titer	4日	外送杏聯醫事檢驗所

檢驗項目一覽表

血清免疫檢驗

適應症：肝炎病毒檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Anti-HAV IgG	14040C	1:黃頭管/血清	<1.0(-); ≥ 1.0(+)	S/CO	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Anti-HAV IgM	14039C	1:黃頭管/血清	<1.0(-); ≥ 1.0(+)	COI	1日	接受七天內未溶血檢體加驗
HBsAg	14032C	1:黃頭管/血清	<0.9(-); ≥ 1.0(+); 0.9-0.999(±)	COI	1日	接受七天內未溶血檢體加驗
HBeAg	14035C	1:黃頭管/血清	<1.0 (-) , ≥ 1.0 (+)	COI	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Anti-HBe	14036C	1:黃頭管/血清	> 1.0 (-) ; ≤ 1.0 (+)	COI	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Anti-HBs	14033C	1:黃頭管/血清	<10.0(-); ≥ 10.0(+)	IU/L	1日	接受七天內未溶血檢體加驗
Anti-HBC	14037C	1:黃頭管/血清	> 1.0 (-) ; ≤ 1.0 (+)	COI	3日	外送杏聯醫事檢驗所
Anti-HCV	14051C	1:黃頭管/血清	<0.9(-); ≥ 1.0(+); 0.9-0.999(±)	COI	1日	接受七天內未溶血檢體加驗

核酸/基因體檢驗

適應症：傳染病檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
HBV DNA Viral Load	12184C	1:黃頭管/血清	Not detected	copies/mL	9日	外送杏聯醫事檢驗所
HCV RNA Viral Load	12185C	1:黃頭管/血清	Not detected	IU/mL	9日	外送杏聯醫事檢驗所
Hepatitis C RNA Genotype	12202B	1:黃頭管/血清	Not detected		12日	外送杏聯醫事檢驗所
HIV Viral Load	14074C	3:紫頭管/全血	Not detected	Copies/mL	8日	外送立人醫事檢驗所(週二、五操作)
Chlamydia DNA	12182C	6:尿管/尿液18:專用管	Negative		5日	外送立人醫事檢驗所
Gonorrhoea DNA	12182C	6:尿管/尿液18:專用管	Negative		5日	外送立人醫事檢驗所
Trichomonas DNA	12182C	6:尿管/尿液18:專用管	Negative		5日	外送立人醫事檢驗所
Mycoplasma genitalium DNA	12182C	6:尿管/尿液18:專用管	Negative		5日	外送立人醫事檢驗所

適應症：阿茲海默症檢查

Apolipoprotein E genotype		3:紫頭管/全血	低風險：E2/E2、E2/E3 一般風險：E3/E3 高風險：E2/E4、E3/E4、 E4/E4		6日	外送立人醫事檢驗所
---------------------------	--	----------	--	--	----	-----------

微量元素檢驗

適應症：微量金屬						
Cu (Copper)	09047B	16:深藍頭管/全血	700-1500	ug/L	9日	外送立人醫事檢驗所
Zn (Zinc)	10012B	16:深藍頭管/全血	700-1200	ug/L	9日	外送立人醫事檢驗所
Al (Aluminum)	10002B	16:深藍頭管/全血	<10;洗腎透析者<20	μg/L	12-20日	外送立人醫事檢驗所
Li (Lithium)	10520C	1:黃頭管/血清	0.6-1.20	mmol/L	3日	外送立人醫事檢驗所

檢驗項目一覽表

臨床血液檢驗						
適應症：血液凝固檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Prothrombin Time	08026C	4:藍頭管/血漿	10-13; 危險值 ≥ 50	sec	3日	外送杏聯醫事檢驗所
APTT	08036B	4:藍頭管/血漿	28.0-40.0; 危險值 ≥ 100 sec	sec	3日	外送杏聯醫事檢驗所
適應症：血球計數檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
WBC	08002C	3:紫頭管/全血	4.00-10.80	$10^3/\mu\text{L}$	1日	接受當天加驗; 避免凝血、溶血
RBC	08001C	3:紫頭管/全血	男性: 4.50-6.00 女性: 3.72-5.50	$10^6/\mu\text{L}$	1日	接受當天加驗; 避免凝血、溶血
Hgb	08003C	3:紫頭管/全血	男性: 13.5-17.5 女性: 11.5-16.0	g/dL	1日	接受當天加驗; 避免凝血、溶血
Hct	08004C	3:紫頭管/全血	男性: 40.5-53.0 女性: 35.0-46.0	%	1日	接受當天加驗; 避免凝血、溶血
MCV		3:紫頭管/全血	80.0-100.0	fL	1日	接受當天加驗; 避免凝血、溶血
MCH		3:紫頭管/全血	26.0-34.0	pg	1日	接受當天加驗; 避免凝血、溶血
MCHC		3:紫頭管/全血	31.0-37.0	g/dL	1日	接受當天加驗; 避免凝血、溶血
PLT	08006C	3:紫頭管/全血	130-400	$10^3/\mu\text{L}$	1日	接受當天加驗; 避免凝血、溶血
CBC-I	08011C	3:紫頭管/全血	參閱上述八項		1日	接受當天加驗; 避免凝血、溶血
CBC-DC	08013C	3:紫頭管/全血	Neutrophil : 40.0-75.0 Lymphocyte : 20.0-56.0 Monocyte : 0.0-12.0 Eosinophil : 0.0-6.0 Basophil : 0.0-1.0	%	1日	接受當天加驗; 避免凝血、溶血
Reticulocyte Count	08008C	3:紫頭管/全血	成人: 0.50-2.00 % 小孩: 0.50-4.00 %	%	3日	外送立人醫事檢驗所
Red Blood Cell Morphology	08009C	3:紫頭管/全血	Normal		3日	外送立人醫事檢驗所
適應症：血型檢查						
Blood Group	11001C	3:紫頭管/全血			1日	接受七天內未溶血檢體加驗
Rh type	11003C	3:紫頭管/全血			1日	接受七天內未溶血檢體加驗

檢驗項目一覽表

臨床尿液檢驗

適應症：泌尿系統檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Urine routine	06012C	6:尿管/尿液	參閱下述兩項		1日	不接受加驗
Urine sediments	06009C	6:尿管/尿液	RBC：0- 2 /HPF WBC：0 - 5 /HPF Epith Cell：0 - 5/HPF Crystal：Not Found Casts：Not Found Bacteria：(-) other：Not Found		1日	不接受加驗
Urine biochemistry	06013C	6:尿管/尿液	Apperance：Clear Color：Yellow PH：5.0 - 8.0 Glucose：(-) Occult blood：(-) Protein：(-) - (±) Urobilinogen：Normal Nitrite：(-) Leukocyte：(-) Bilirubin：(-) Ketone body：(-) Specific Gravity：1.003~1.035		1日	不接受加驗
適應症：毒品篩檢						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Amphetamine	10810B	6:尿管/尿液	Negative		3日	外送杏聯醫事檢驗所
Morphine/Opiate/Heroin Screen	10811B	6:尿管/尿液	Negative		3日	外送杏聯醫事檢驗所
毒物篩檢 9 項		6:尿管/尿液	Negative		4日	外送立人醫事檢驗所
適應症：懷孕檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Pregnancy test	06505C	6:尿管/尿液			1日	不接受加驗

檢驗項目一覽表

臨床糞便檢驗						
適應症：消化道檢查						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Stool Routine	07009C	7:糞便管/糞便	Color : yellow-brown Consistency : Soft-formed Digestion : Good-Moderate Mucus : (-) Gross blood : (-) Occult Blood : (-) Parasite : Not found Parasite ova : Not found Ameoba : Not found Pus Cell : 0 /HPF RBC : 0-1 /HPF WBC : 0-3 /HPF		1日	不接受加驗
MIF Parasite	07012C	7:糞便管/糞便	Not found		4日	外送立人醫事檢驗所
FOBT(EIA/LIA)	09134C	8:專用管/糞便	Negative : < 100	ng/mL	1日	不接受加驗
H.pylori stool Ag	30522C	17:專用管/糞便	陰性		1日	不接受加驗

臨床細菌檢驗						
適應症：細菌感染						
檢驗項目	健保代碼	採檢容器/檢體	參考值		報告時效	備註
Culture:Anaerobic Culture	13007C	12:厭氧培養管	Not found		3-7日	外送杏聯醫事檢驗所
Culture:Urine Culture	13007C	9:無菌寬口杯/尿液	Not found		3-5日	外送杏聯醫事檢驗所
Culture:Sputum Culture	13007C	13:痰盒/痰液	Not found		3-5日	外送杏聯醫事檢驗所
Culture:Wound culture	13007C	11 12 tanstube:Wound	Not found		3-5日	外送杏聯醫事檢驗所
Culture:CVP Culture	13007C	9 11:無菌寬口杯/尿液	Not found		3-5日	外送杏聯醫事檢驗所
Culture:Blood Culture	13016B	14:血瓶/Blood	Not found		3-7日	外送杏聯醫事檢驗所

未列表之項目與外送杏聯項目內容請參見杏聯醫事檢驗所之採檢手冊，聯結如下：

<https://topcml.com/manuals/>

外送立人檢驗項目內容請參見立人醫事檢驗所之採檢手冊，聯結如下：

<https://www.lez.com.tw/>

附件5.3 抱怨處理流程圖

